




せんねん灸オフ

ご使用説明書

ご使用前に必ずお読みください

「使用の禁止」「使用の注意」「保管・取扱いの注意」
「使用の方法」が書かれています。

よくお読みになり、正しい使用を心がけてください。
必要な時に読めるよう、大切に保管してください。

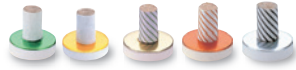

⚠️ ご使用前の重要な注意

- お灸は「やけど(水疱)」が起こることがあります
- お灸は「痕(あと)」が残ることがあります

使用の禁止

1. 次のような人は使用しないでください

- 自分の意思で本品を取り外すことができない人
- 幼児

2. 次のような時には使用しないでください


- 発熱している時
- 発汗している時
- 入浴前後約 30 分

3. 次のような部位には使用しないでください

- 顔面
- 粘膜
- 湿疹、かぶれ、傷口
- 急性外傷患部(打撲、ねんざ等ケガの患部)
- 発汗するなどして、お肌が濡れているところ

4. 次のような使用はしないでください

- 火のついてる方を下向きにしないでください
煙、熱によって「やけど(水疱)」が起こることがあります
- 同時にたくさんの箇所使用しないでください
- 同じポイントに繰り返し使用しないでください
- 台座の穴に異物を入れて使用しないでください

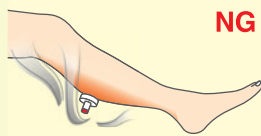

5. この製品は再使用しないでください

初めてご使用になる方は「温熱レベル1~2」から始めてください

高 ↑ 温熱レベル ↓ 低	5	強力温熱	にんにく レギュラー
	4	せんねん灸オフ	にんにくきゅう しょうがきゅう みそきゅう
	3	せんねん灸オフ	レギュラーきゅう
	2	せんねん灸オフ せんねん灸	ソフトきゅう アロマきゅう
	1	せんねん灸	香りセレクト4 はじめてのお灸 レインボー

使用の注意

次の人は必ず医師または薬剤師に 相談の上、ご使用ください

- 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば、発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
- 肌の弱い方(疾患肌、敏感肌、不安定肌など)
- 呼吸器疾患をお持ちの人
- 妊娠中の人
- 糖尿病等、温感及び血行に障害をお持ちの人

使用中はご注意ください

- 「熱い」と感じた時はすぐに取り除いてください
取り除かないと「やけど(水疱)」が起こる、「痕(あと)」が残ることがあります
- 熱の感じ方はさまざまな使用条件(環境、体質、体調、部位など)で変わり、一定ではありません
- 使用条件(環境、体質、体調、部位など)の変化により、「やけど(水疱)」が起こる、「痕(あと)」が残ることがあります
- もぐさの燃焼中は、火だけでなく、台座や煙も熱いので「やけど(水疱)」が起こる、「痕(あと)」が残ることがあります
- 肌の弱い部分(おなか、太もも、ふくらはぎなど)は「やけど(水疱)」が起こる、「痕(あと)」が残ることがあります

保管・取扱いの注意

- 湿気を避けて保管し、水等でぬらさないでください
- 付属の乾燥剤を入れたまま保管してください
- 幼児の手の届かないところに保管してください
- 本品は食べられません
- お灸以外の使用はできません
- 火を使いますので火災には十分注意してください
- 使用後は、完全に火が消えたことを確認してから、一般ごみとして廃棄してください(分別はお住まいの自治体によって異なりますのでご確認ください)

やさしい自然を人に、暮らしに。



<https://sennenq.co.jp>

製造 せんねん灸株式会社
販売元 セネファ株式会社
〒526-0244 滋賀県長浜市内保町77番地

☎ 0120-78-1009
受付時間 午前9:00~午後5:00(土日・祝日休み)



使用の方法

- 肌の状態をよく観察して安全を確かめてください
- はじめてお灸をすえる場合、お灸ポイントは1ヶ所、お灸は1点から始めてください
- お灸ポイントは1回あたり1~3ヶ所程度が適当です
- 熱の感じ方は個人差があります
- 温かく感じる程度でお灸をすえてください



1
台座の裏の薄紙をはがします



2
台座を指先に貼りもぐさに火をつけます



3
もぐさに火がついたら肌に貼りつけます



4
煙が消えても熱は持続しています



5
●「熱い」と感じた時
「熱い」と感じた時点で、**すぐに取り外してください**
取り外さないと「やけど（水疱）」が起こる、「痕（あと）」が残ることがあります

●「熱い」と感じなかった時
台座に触れ、冷めていることを確認したら取り外してください

せんねん灸 オフ プレゼント応募券台紙

せんねん灸オフのパッケージにあるプレゼント応募券を集め、この応募券台紙に貼って、発売元セネファ株式会社（ご愛用者プレゼント係）までご送付ください。人形マークの数に応じて商品をごプレゼントいたします。

応募方法



プレゼント応募券の人形マーク（♂）を10人でせんねん灸オフ小を1箱、20人で中を1箱、30人で大を1箱、40人で特大を1箱と交換いたします。

- 10人単位でお集めください。
- 端数分は切ってお貼りください。切り取った人形マークは次回にご利用いただけます。



※「せんねん灸の奇跡」と「火を使わないお灸」のプレゼント応募券とは一緒に使用できません

氏名	ふりがな（ ）	年齢	歳
住所	〒 		
電話	※電話番号は必ずご記入ください。 （ ）		職業
ご希望商品に☑をつけてください。 <input type="checkbox"/> ソフトきゅう 竹生島 <input type="checkbox"/> レギュラーきゅう 伊吹 <input type="checkbox"/> みそきゅう 湖国 <input type="checkbox"/> しょうがきゅう 八景 <input type="checkbox"/> にんにくきゅう 近江			
プレゼント応募券をお貼りください			
プレゼント応募券をお貼りください			
プレゼント応募券をお貼りください			
プレゼント応募券をお貼りください			
プレゼント応募券をお貼りください			
プレゼント応募券をお貼りください			
プレゼント応募券をお貼りください			
プレゼント応募券をお貼りください			
プレゼント応募券をお貼りください			
プレゼント応募券の詳しい応募方法はホームページをご覧ください			
プレゼント応募券送付先 〒526-0244 滋賀県長浜市内保町77番地 TEL.0749-74-0556 FAX.0749-74-0336 発売元 セネファ株式会社			

✂ 切り取って郵送ください

ご記入頂きました個人情報についてはご応募いただいたプレゼントの発送とキャンペーンのお知らせに利用いたします。今後弊社からのお知らせが必要な方はご返送の際に不要の欄にチェックをお願いいたします。お客様の情報は個人情報保護法に基づき厳重に管理すると共にお客様ご本人の承諾がない限り第三者に提供いたしません。

不要