

お灸

ご使用説明書

間違った使用法はトラブルの原因です。

この説明書をよくお読みになり、正しく上手な使い方を心がけてください。また、必要な時に読めるよう、大切に保管しておいてください。



使用上の注意

- お灸の効果が熱刺激はなくてはならないものです。ご使用時に、熱さを強く感じたり、熱さが不快なときは我慢せず取り除いてください。低温やけどになる場合がありますのでご注意ください。
- 「体質」「健康状態」「身体の部位」「気温・湿度」「気候」などの違いによって温熱の感じ方に変化が生じますのでご注意ください。
- 商品によっては温熱の違いが発生することもあります。低温やけどにご注意ください。
- 皮膚の敏感な方、かぶれ易い方等、低温やけどを生じる場合がありますため、自らの皮膚の状態を十分考慮してください。

温熱効果


1. 疲労回復
2. 血行をよくする
3. 筋肉の疲れをとる
4. 筋肉のこりをほぐす
5. 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解
6. 胃腸の動きを活発にする

管理医療機器 温灸器
承認番号 15900BZZ01361000
再使用禁止(使い捨て)

Mサイズ 約4時間
Lサイズ 約8時間
40~50℃

持続時間：M・約4時間 L・約8時間 皮膚面平均温度 約40~50℃

火を使わないお灸世界の使い方

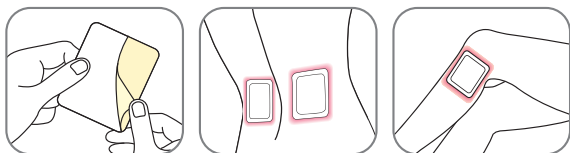

袋より火を使わないお灸世界を取り出し、皮膚面(裏面)のシールをはがし患部にはってください。

- 外袋を開封すると発熱を開始します。
- 本品は、同じところには一日一回を目安にご使用ください。
- 本品、Mサイズ4時間、Lサイズ8時間以上の使用はおやめください。

低温やけどにご注意ください

次のような人は使用しないでください

- 自分の意思で本品を取り外すことができない人
- 幼児

次のような部位には使用しないでください

- 顔面
- 粘膜
- 湿疹、かぶれ、傷口
- 急性外傷患部

この製品は再使用しないでください

使用上の注意

〈重要な基本的注意〉

- 次の人は必ず医師または薬剤師に相談の上、ご使用ください。今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことのある人。妊娠中の人。糖尿病等、温感及び血行に障害をお持ちの人。
- 本品に火は絶対に使用しないでください。
- 本品をもんだり、切ったり、破ったり、水で濡らして使用しないでください。
- 外袋を開封すると発熱を開始します。開封後の保存はできません。温熱の持続時間を過ぎますと発熱しません。
- 入浴直前、直後の使用はさけてください。
- 就寝時には使用しないでください。
- 有熱時は使用しないでください。
- 本品のMサイズは4時間以上、Lサイズは8時間以上の同じ部位での継続使用はおやめください。
- 本品とこたつ、カイロ、電気毛布、床暖房用カーペット、その他暖房器具などと併用しないでください。
- 本品をはった上から「寝具、サポーター、ベルト、バック」等で圧迫しないでください。
- 本品は、続けて同じところにはらないでください。一日一回を目安にご使用ください。特にはじめてご使用の方や、肌の弱い方は低温やけどにお気をつけください。
- 皮膚の敏感な方、かぶれ易い方等、低温やけどが生じる場合がありますため、自らの皮膚の状態を十分考慮してください。
- 使用後に低温やけどを起こしていると、皮膚はく離を起こす場合がありますので、本品をはがす時はゆっくりとはがしてください。
- 汗をかきやすい環境での使用にご注意ください。特に「初夏~初秋」にかけては「気温・湿度」とともに高いので注意してください。
- 熱さを強く感じた時や、かゆみ等違和感がある時は、取り除いてください。
- お尻など感覚の鈍い部位では、特に低温やけどを起こしやすいので注意してください。
- 使用後は、お住まいの自治体の分別に従って廃棄してください。

低温やけどが生じやすい時

気温が高い	敏感肌
湿度が高い	むくんでいる
疲労が強い	汗をかいている

保管方法

〈保管の条件〉

- 幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 直射日光を避けて保管してください。

やさしい自然を人に、暮らしに。



製造販売元 **せんねん灸株式会社**
 発売元 **セネファ株式会社**
 〒526-0244 滋賀県長浜市内保町77番地
 TEL.0749-74-0556 FAX.0749-74-0336

<https://sennenq.co.jp>

0120-78-1009

受付時間 午前9:00~午後5:00(土・日・祝日休み)


特長

1. 火を使わない温灸です。
2. 素肌に直接はり、身体の気になるポイント(施灸ポイント)を温めます。
3. 温熱の持続時間はMサイズ約4時間、Lサイズ約8時間です。
4. 約40～50℃位の温かさで血行をよくし、筋肉の疲れやこりをほぐす温熱効果があります。
5. 火を使わず、においもほとんどありませんので外出時にもご使用いただける便利なお灸です。

施灸ポイントの見つけ方

1. あなたのカラダの施灸ポイントを見つけましょう。
2. 施灸ポイントと思われる部分を指でなでてください。
へこんでいる、皮膚がカサついている、軽く押して軽い痛み(圧痛)を感じる場所が施灸ポイントです。

火を使わないお灸世界 おすすめの使い方

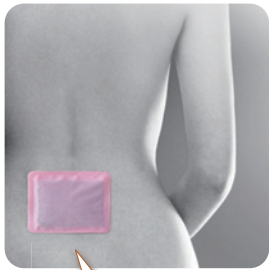

自分でお灸がしづらい
背中や腰に



衣服の下にはり、そのまま
外出もできます。
仕事中、移動中も便利。



じっくり温めたい時に



広い範囲に最適なお灸

「健康状態」「身体の部位」などによっては、温熱が感じやすい場合があります。また、はげしく動くと取れる場合があります。取り扱いには、ご注意ください。

火を使わないお灸 世界 プレゼント応募券台紙

「火を使わないお灸 世界」のパッケージにあるプレゼント応募券を集め、この応募券台紙に貼って、発売元セネファ株式会社(ご愛用者プレゼント係)までご送付ください。人形マークの数に応じて商品をプレゼントいたします。

応募方法

プレゼント応募券の人形マーク(人形マーク)を5点で「火を使わないお灸世界」M3枚入を1箱、20点でM12枚入を1箱、30点でL10枚入を1箱、40点でM24枚入を1箱と交換いたします。

- 10人単位でお集めください。ただし5人からご応募いただけます。
- 端数分は切ってお貼りください。切り取った人形マークは次回にご利用いただけます。



氏名	ふりがな ()		年齢	歳
	〒			
住所				
電話	※電話番号は必ずご記入ください。			職業
	()			
<p>プレゼント応募券は「火を使わないお灸 世界」に統一してください。 他の商品の応募点数券と混ぜて応募することは出来ません。</p>				
プレゼント応募券をお貼りください		プレゼント応募券をお貼りください		プレゼント応募券をお貼りください
プレゼント応募券をお貼りください		プレゼント応募券をお貼りください		プレゼント応募券をお貼りください
プレゼント応募券をお貼りください		プレゼント応募券をお貼りください		プレゼント応募券の詳しい応募方法はホームページをご覧ください 
<p>プレゼント応募券送付先 〒526-0244 滋賀県長浜市内保町77番地 TEL.0749-74-0556 FAX.0749-74-0336 発売元 セネファ株式会社</p>				

切り取ってご郵送ください

ご記入頂きました個人情報についてはご応募いただいたプレゼントの発送とキャンペーンのお知らせに利用いたします。今後弊社からのお知らせが不要な方はご返送の際に不要の欄にチェックをお願いいたします。お客様の情報は個人情報保護法に基づき厳重に管理すると共にお客様ご本人の承諾がない限り第三者に提供いたしません。

不要