

# 火を使わないお灸「せんねん灸太陽」のてびき

火を使わないから、においも煙も出ない  
いつでも、どこでも、貼るだけのお灸

**!** 間違った使用法はトラブルの原因です。  
低温やけどを未然に防ぐために注意事項をご使用前に必ずお読みください。


肩



## 温熱効果

1. 疲労回復
2. 血行をよくする
3. 筋肉の疲れをとる
4. 筋肉のこりをほぐす
5. 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解
6. 胃腸の働きを活発にする

足

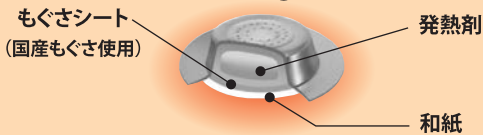

皮膚面平均温度 約40~50℃  
温熱持続時間 約3時間

管理医療機器 温灸器  
承認番号 15900BZZ01362000  
再使用禁止(使い捨て)

## ご使用方法



**1 はがす**  
外装シールより火を使わないお灸「せんねん灸太陽」を取り出し、上部(凸部)のシールをはがします。



**2 はがす・はる**  
皮膚面(底部)のシールをはがし、患部にはってください。

※上部シールを開封すると発熱を開始します。※本品は、同じところには一日一回を目安にご使用ください。  
※本品の3時間以上の使用はおやめください。  
※本品は1箇所、または、同じ箇所に3時間貼り続けるものではありません。  
※気温、湿度、体調、肌の状態、使用状況にあわせて使用時間を調整してください。

## 火を使わないお灸「せんねん灸太陽」使用上の注意

**!!** 次の人は必ず医師または薬剤師に相談の上 ご注意ください

〈重要な基本的注意〉


- 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことのある人。
- 妊娠中の人。
- 糖尿病等、温感及び血行に障害をお持ちの人。

**!!** 使用上の注意

- 本品に火は絶対に使用しないでください。
- 本品をもんだり、切ったり、破ったり、水で濡らして使用しないでください。
- 上部シールを開封すると発熱を開始します。開封後の保存はできません。温熱の持続時間を過ぎますと発熱しません。
- 入浴直前、直後の使用はさけてください。
- 就寝時には使用しないでください。
- 有熱時は使用しないでください。
- 本品の3時間以上の同じ部位での継続使用はおやめください。
- 本品とこたつ、カイロ、電気毛布、床暖房用カーペットその他暖房器具などと併用しないでください。
- 本品をはった上から「寝具、サポーター、ベルト、バック」等で圧迫しないでください。
- 本品は、続けて同じところにはらないでください。一日一回を目安にご使用ください。特にはじめてご使用の方や、肌の弱い方は**低温やけどなど、肌トラブル**にお気をつけください。
- 皮膚の敏感な方、かぶれ易い方等、**低温やけどなど、肌トラブル**が生じる場合があるため、自らの皮膚の状態を十分考慮してください。
- 使用後に**低温やけどなど、肌トラブル**を起こしていると、皮膚はく離を起こす場合がありますので、本品をはがす時はゆっくりとはがしてください。
- 汗をかきやすい環境での使用はご注意ください。特に「初夏~初秋」にかけては「気温・湿度」とも高いので注意してください。
- 熱さを強く感じた時や、かゆみ等違和感がある時は、取り除いてください。
- お尻など感覚の鈍い部位では、特に**低温やけどなど、肌トラブル**を起こしやすいので注意してください。
- 使用後は、お住まいの自治体の分別に従って廃棄してください。

## 火を使わないお灸「せんねん灸太陽」 おすすめの使い方

自分でお灸がしづらい  
肩に

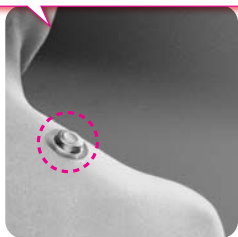

衣服の下にはり、  
そのまま外出もできます



長い時間ゆっくり  
あたためたいポイントに



子育てママにも安心安全



“いつでも” “どこでも”  
貼るだけで温かいお灸

## 火を使わないお灸「せんねん灸太陽」使用上の注意

**!!** 次のような人は使用しないでください

- 肌の弱い人(疾患肌、敏感肌、不安定肌など)
- 自分の意思で本品を取り外すことができない人 ● 幼児

**!!** 次のような部位には使用しないでください

- 顔面 ● 粘膜 ● 湿疹、かぶれ、傷口 ● 急性外傷患部

**!!** この製品は再使用しないでください

**!!** 保管方法

〈保管の条件〉

- 幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 直射日光を避けて保管してください。

## 火を使わないお灸「せんねん灸太陽」 商品ラインアップのご紹介



火を使わないお灸  
6コ入



火を使わないお灸  
12コ入



火を使わないお灸  
30コ入



火を使わないお灸  
60コ入



薬局・薬店またはせんねん灸直営ショップ・ホームページにてお買い求めいただけます



<https://sennenq.co.jp>  
0120-78-1009

製造元 せんねん灸株式会社  
販売元 セネファ株式会社  
〒526-0244 滋賀県長浜市内保町77番地  
TEL.0749-74-0556 FAX.0749-74-0336

受付時間 午前9:00~午後5:00(土・日・祝日休み)